

Manuale Utente

2015A

**Monoleva
Acceleratore e Freno**



Guidosimplex

www.guidosimplex.it

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex.

Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto assoluto delle vigenti normative di sicurezza.

I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non richiedono particolare manutenzione.

Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche intrinseche ed il design dell'autovettura che può essere, in qualunque momento, riportata nella sua configurazione originale.

Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate le modalità per il suo corretto uso.

Vi consigliamo pertanto di prendere visione del presente manuale ancor prima di utilizzare il prodotto.



DESCRIZIONE

La monoleva 2015A è un dispositivo che ci permette di controllare l'azione di frenatura ed accelerazione dell'autovettura manualmente. Esercitando una spinta verso l'avanti per effetto di una trasmissione meccanica si ottiene una frenata proporzionale alla spinta esercitata.

Agendo sulla levetta posta sulla parte posteriore della monoleva nelle vicinanze del pomo di spinta si agisce su di un potenziometro interno ottenendo l'accelerazione.

La monoleva 2015 è un prodotto appositamente sviluppato e consigliato per le persone disabili con perdita funzionale parziale o completa di entrambi gli arti inferiori.





UTILIZZO

Il blocco della leva avviene mediante un'azione elettromeccanica azionata da un pulsante integrato nella leva, ciò ne rende l'utilizzo estremamente semplice

La leva è dotata di tre pulsanti per la gestione dei seguenti servizi:

CLACSON, **KICK DOWN** e **BLOCCO FRENO ELETTRICO**

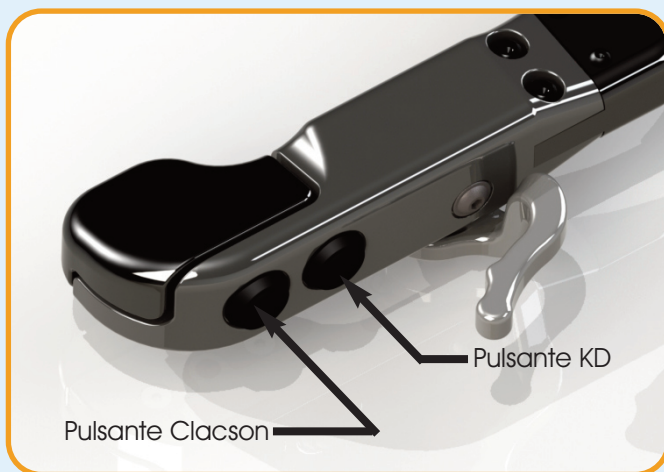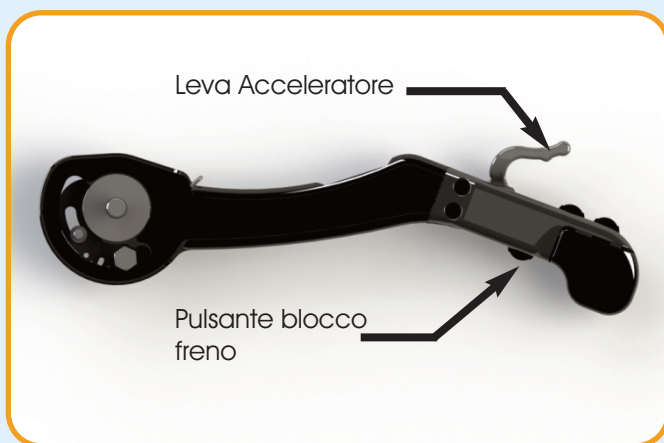

ATTIVAZIONE



PER ATTIVARE IL DISPOSITIVO:

- 1 AVVIARE IL MOTORE
- 2 ATTIVARE IL DISPOSITIVO PORTANDO L'INTERRUTTORE (A) IN POSIZIONE ON (LED ROSSO ACCESO)
- 3 PREMERE A FONDO LA MONOLEVA



PER POTER UTILIZZARE LA VETTURA CON IL PEDALE ACCELERATORE ORIGINALE È NECESSARIO DISATTIVARE IL DISPOSITIVO GUIDOSIMPLEX ATTRAVERSO L'INTERRUTTORE (A) (LED ROSSO SPENTO)

Nel caso di anomalie o malfunzionamenti del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.

Potrà trovare il centro di assistenza più vicino consultando il sito internet

www.guidosimplex.it

Questo Manuale dell'Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. e non comporta in sé alcuna garanzia.

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei programmi.

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.



Guidosimplex S.r.l.
Via del Podere San Giusto, 29
00166 Roma
Tel. 06 6152801 r.a.
Fax 06 61528036
infoclient@guidosimplex.it

www.guidosimplex.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO