

MANUALE UTENTE

Rev. 01

Freno di servizio manuale

907

907/FV



Guidosimplex

www.guidosimplex.it

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex.

Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto assoluto delle vigenti normative di sicurezza.

I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non richiedono particolare manutenzione.

Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche intrinseche ed il design dell'autovettura che può essere, in qualunque momento, riportata nella sua configurazione originale.

Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate le modalità per il suo corretto uso.

Vi consigliamo pertanto di prendere visione del presente manuale ancor prima di utilizzare il prodotto.



FRENO DI SERVIZIO MANUALE

Gli articoli illustrati di seguito interessante la funzione di arresto dell'autoveicolo per mezzo di dispositivi il cui azionamento viene effettuato con gli arti superiori, essi consistono in un particolare meccanismo a leva collegato direttamente al pedale freno.

Gestione della frenata

la leva freno manuale consente una frenata conforme alla spinta che si esercita, più la spinta è forte più l'arresto dell'autovettura sarà repentino, più la spinta è delicata più l'arresto sarà graduale.

907




907/FV



ATTENZIONE: SI RICORDA CHE SU VETTURE CON LO STERZO REGOLABILE , IL VOLANTE DOVRÁ RIMANERE SEMPRE NELLA STESSA POSIZIONE, PER EVITARE PROBLEMI ALL'IMPIANTO FRENANTE.

907 - FUNZIONE DEI PULSANTI

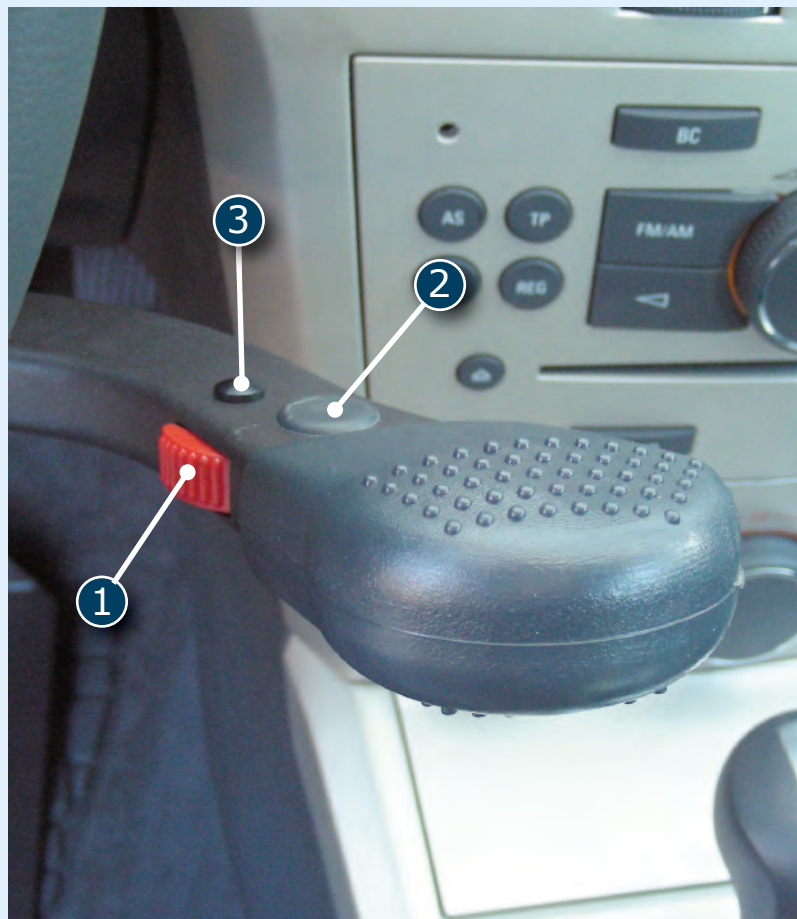

① Bloccaggio della leva freno

Bloccaggio:

spingere a fondo la leva freno premendo contemporaneamente il pulsante di bloccaggio, mantenendo premuto il pulsante di bloccaggio, alleggerire la pressione sulla leva.

Sbloccaggio:

spingere a fondo la leva.


② Avvisatore acustico.

③ Kick-down (attivato solo se installato in abbinamento con l'acceleratore manuale)

Premendo il pulsante Kick-down, nel caso di vettura con cambio automatico, si ottiene uno spunto maggiore di velocità.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE MAI IL BLOCCAGGIO DELLA LEVA FRENO ① PER SOSTITUIRE IL FRENO DI STAZIONAMENTO DELL'AUTOVETTURA DURANTE LA SOSTA DEL VEICOLO.

907/FV - FUNZIONE DEI PULSANTI

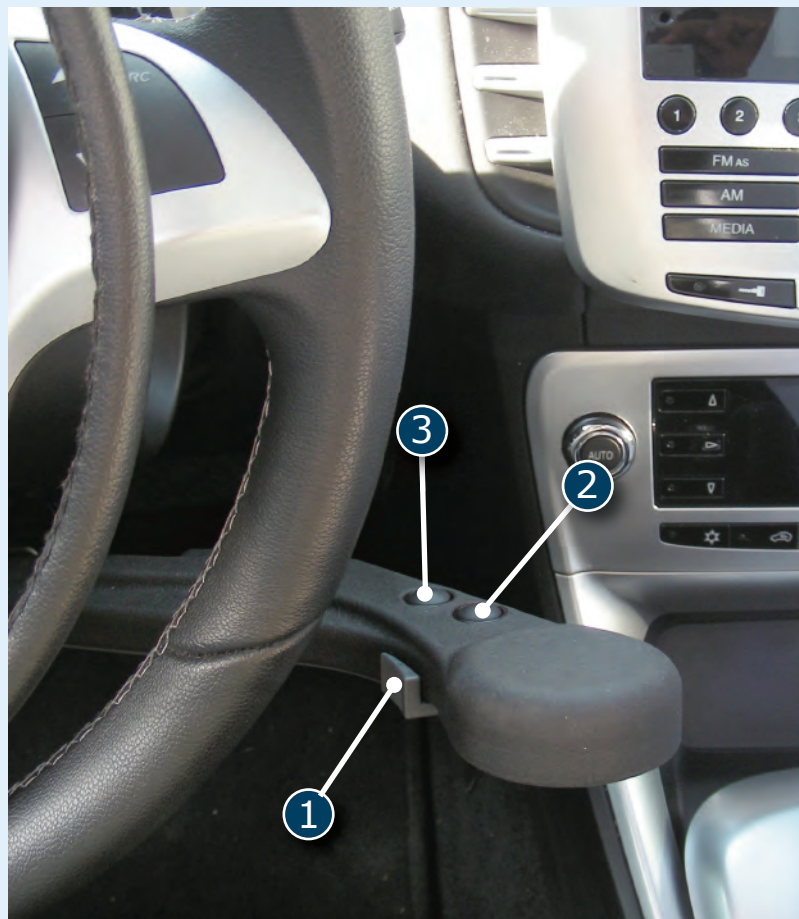

① Bloccaggio della leva freno

Bloccaggio:

spingere a fondo la leva freno premendo contemporaneamente il pulsante di bloccaggio, mantenendo premuto il pulsante di bloccaggio, alleggerire la pressione sulla leva.

Sbloccaggio:

spingere a fondo la leva.

② Avvisatore acustico.


③ Kick-down (attivato solo se installato in abbinamento con l'acceleratore manuale)

Premendo il pulsante Kick-down, nel caso di vettura con cambio automatico, si ottiene uno spunto maggiore di velocità.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE MAI IL BLOCCAGGIO DELLA LEVA FRENO ① PER SOSTITUIRE IL FRENO DI STAZIONAMENTO DELL'AUTOVETTURA DURANTE LA SOSTA DEL VEICOLO.


AVVERTENZE

L'installazione su un'autovettura di un freno di servizio manuale prevede, secondo le esigenze e nel rispetto delle norme di sicurezza, la modifica del pedale freno originale, che viene sezionato in due parti per renderlo asportabile, oppure il montaggio di una paratia a protezione della pedaliera.

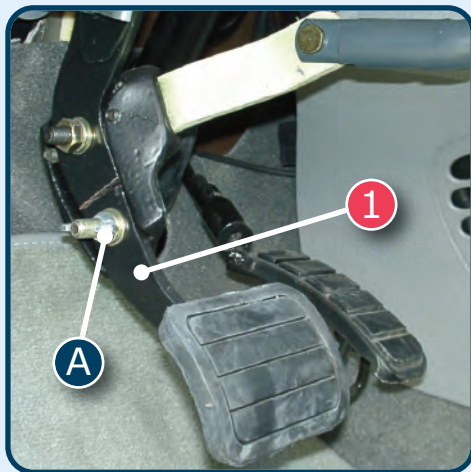

Per rimuovere la parte sfilabile del pedale freno occorre svitare il galletto **A** .

AVVERTENZE

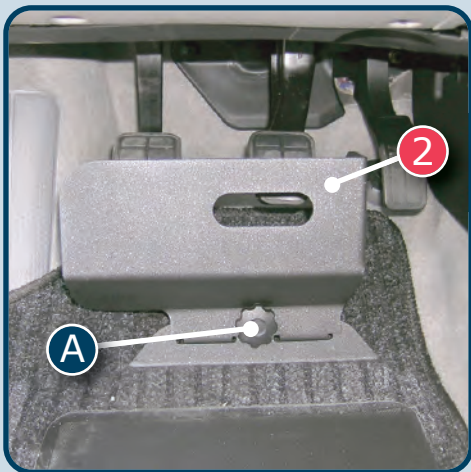

Per inserire la paratia di copertura della pedaliera occorre avvitare il pomello **A** che la fissa alla piastra di ancoraggio.

In ogni caso, prima di utilizzare l'autovettura è indispensabile accertarsi, di aver tolto la parte mobile del pedale freno **1 o di aver montato la paratia **2**.**



Freno a spinta manuale in avanti 907/FV
in abbinamento all'acceleratore
elettronico a cerchiello 906GV

Nel caso di anomalie o malfunzionamenti del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.

Potrà trovare il centro di assistenza più vicino consultando il sito internet

www.guidosimplex.it

Questo Manuale dell'Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. e non comporta in sé alcuna garanzia.

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei programmi.

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.



Guidosimplex S.r.l.
Via del Podere San Giusto, 29
00166 Roma
Tel. 06 6152801 r.a.
Fax 06 61528036
infoclient@guidosimplex.it
www.guidosimplex.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO